


座・ラクツション

The Racushion

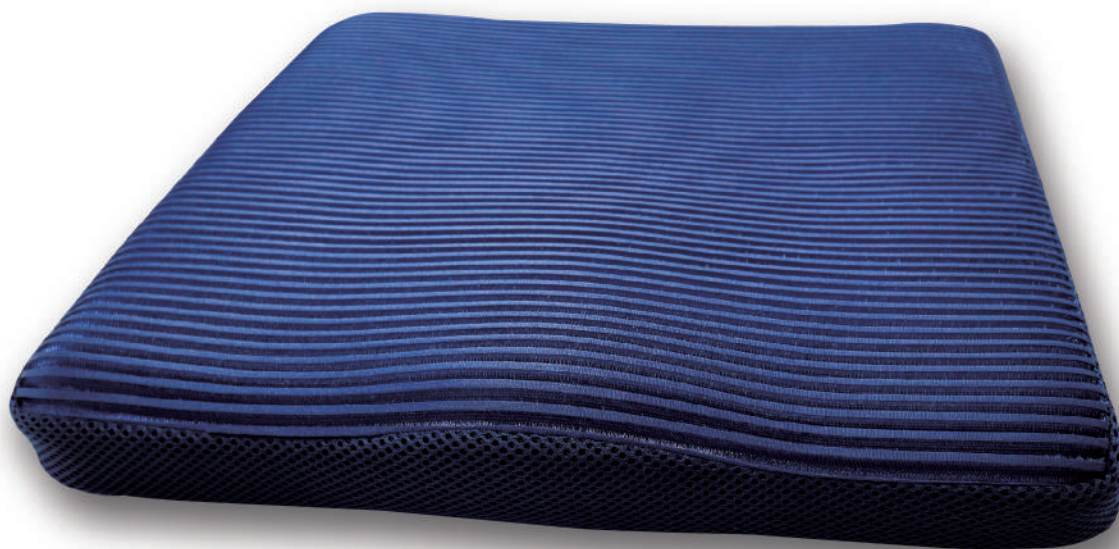


POINT1

車椅子にピッタリで体に合わせた立体成型の為、安定感のある座り心地となっています



POINT2

専用カバーは表地に凹凸の生地を使用する事でずり落ちを防ぐ効果があり、裏地はメッシュ構造で通気性も良く洗濯も可能です

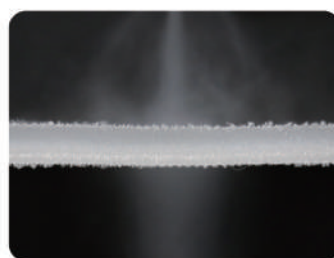

POINT3

中材は空気層の多い立体構造体になっており通気性と耐久性が高く、座位保持に優れています

クッション使用の効果

●ずり落ちの防止

高齢者に多いのが車椅子からのずり落ちです。転落・転倒等によるケガや事故を防ぎます



●床ずれの防止

クッションを使用する事で体圧を分散し床ずれのリスクを下げる効果が期待できます

●お尻の痛みを緩和

離床時間が増加し食事や外出を楽しむ余裕が出る

体圧分散性能比較

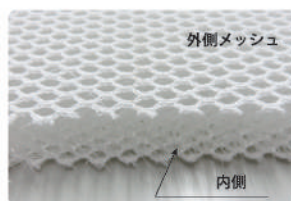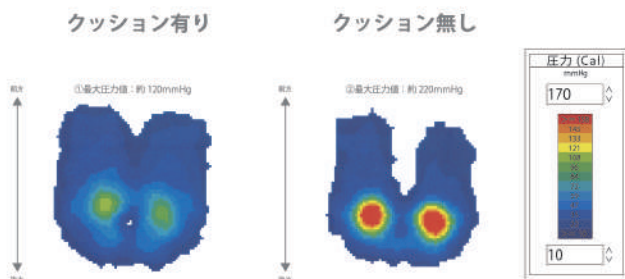


中材の外側はメッシュ素材を使用し、内側はポリエステル系の素材を使用している為通気性があります



クッションのカバー裏面はPVCすべり止め加工を施しています

ご使用上の注意

- ・ 車椅子の座面に敷いてご使用ください。
- ・ サイズの合わない車椅子には使用しないでください。ずれや変形などが生じる恐れがあります。
- ・ 火気または高温のものに近づけないでください。
- ・ 洗濯後は風通しの良い日陰で干してください。
- ・ 中材を洗濯の際は、水またはぬるま湯で手洗い（押し洗い）してください。カバーは洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、必ず洗濯ネットに入れて洗濯してください。

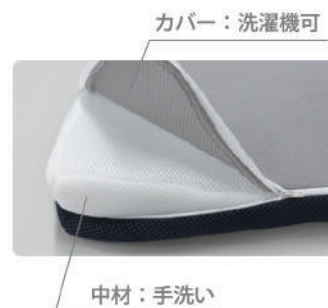

使用方法

- ・ 裏面には滑り止め加工がしてあります。その面を車椅子の座面に当たるように敷いてご使用ください。
- ・ 側面の前後ラベル表記に従って設置してください。カバーのファスナー部分が後ろ側（背中側）になります。



仕様

- ・ 材質：カバー／ポリエステル 中材／ポリエステル
裏面／PVCすべり止め加工
- ・ サイズ：幅400mm×奥行き400mm×高さ40～60mm
- ・ 色：ネイビー
- ・ TAIS：02076-000001

商品についてのお問い合わせは



株式会社 丸昌

641-0004 和歌山市和田 115

TEL 073-472-1294

レンタル価格 **1,000** 円/月

1割 **100** 円/月

ご利用負担額 2割 **200** 円/月

3割 **300** 円/月